



## Cea Test Immunofluorescenza

### 【ISTRUZIONI PER L'USO Cea Test Immunofluorescenza】

Fare riferimento al manuale operativo dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per le istruzioni complete sull'uso del test. Il test dovrebbe essere a temperatura ambiente.

Lasciare che il test, il campione, il tampone e / o i controlli raggiungano la temperatura ambiente (15-30 ° C) prima del test.

1. Accendere l'analizzatore. Quindi, a seconda delle necessità, selezionare la modalità "test standard" o "test rapido".
2. Rimuovere la scheda ID e inserirla nello slot per scheda ID dell'analizzatore.
3. Pipettare 50 µL di siero o plasma nella provetta del tampone, mescolare bene il campione e il tampone.
4. Pipettare 75 µL di campione diluito nel pozzetto del campione della cassetta. Avvia il timer allo stesso tempo.
5. Sono disponibili due modalità di test per l'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™, la modalità di test standard e la modalità di test rapido. Fare riferimento al manuale utente dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per i dettagli.

**Modalità "Quick test":** dopo 15 minuti di aggiunta del campione, inserire la cassetta del test nell'analizzatore, fare clic su "QUICK TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" immediatamente. L'analizzatore fornirà automaticamente il risultato del test dopo pochi secondi.

**Modalità "Standard test":** inserire la cassetta del test nell'analizzatore immediatamente dopo aver aggiunto il campione, fare clic su "STANDARD TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" allo stesso tempo. L'analizzatore effettuerà automaticamente un conto alla rovescia di 15 minuti. Dopo il conto alla rovescia, l'analizzatore darà subito il risultato.

## Quick Test Mode



Dispense Sample



Incubate the test unit



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

## Standard Test Mode



Dispense Sample



Insert the Cassette



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

| Numero di Catalogo | Nome Elemento                  | Campione | Intervallo Test | Dimensioni KIT |
|--------------------|--------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| FI-CEA-302         | CEA Test<br>Immunofluorescenza | S / P    | 1~ 500 ng / mL  | 10T / 25T      |