



Test Proteina C reattiva CRP

【ISTRUZIONI PER L'USO Test Proteina C reattiva CRP】

Fare riferimento al manuale operativo dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per le istruzioni complete sull'uso del test. Il test dovrebbe essere a temperatura ambiente.

1. Accendere l'analizzatore. Quindi, a seconda delle necessità, selezionare la modalità "Test standard" o "Test rapido".
2. Estrarre la carta d'identità e inserirla nella porta dell'analizzatore.
3. Siero o plasma: pipettare 5 µL di siero o plasma nella provetta del tampone, mescolare bene il campione e il tampone.

Sangue intero: trasferire 7,5 µL di sangue intero nella provetta tampone con il campionatore fornito o con una pipetta; mescolare bene il campione e il tampone.

4. Aggiungere il campione diluito con una pipetta: pipettare 75 µL di campione diluito nel pozzetto del campione della cassetta. Avvia il timer allo stesso tempo.

Aggiungere il campione con il campionatore fornito: scartare le prime 2 gocce, quindi aggiungere 2 gocce di campione diluito nel pozzetto del campione della cassetta. Avvia il timer allo stesso tempo.

5. Sono disponibili due modalità di test per l'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™, la modalità Standard Test e la modalità Quick Test. Fare riferimento al manuale utente dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per i dettagli.

Modalità "Quick test": inserire la cassetta del test nell'analizzatore 3 minuti dopo aver fatto clic su "QUICK TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" immediatamente. l'analizzatore fornirà automaticamente il risultato del test dopo pochi secondi.

Modalità "Standard test": inserire la cassetta del test nell'analizzatore immediatamente dopo l'applicazione del campione, fare clic su "STANDARD TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" allo stesso tempo, l'analizzatore eseguirà automaticamente un conto alla rovescia di 3 minuti. Dopo il conto alla rovescia, l'analizzatore darà subito il risultato.

Quick Test Mode



Dispense Sample



Incubate the test unit



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

Standard Test Mode



Dispense Sample



Insert the Cassette



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

Numero di Catalogo	Nome Elemento	Campione	Intervallo Test	Dimensioni KIT
FI-CRP-402	Test Proteina C reattiva CRP	WB / S / P	0,5 ~ 200 mg / L	10T / 25T