



## Test D-Dimero a Immunofluorescenza

### **【ISTRUZIONI PER L'USO Test D-Dimero a Immunofluorescenza】**

Fare riferimento al manuale operativo dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per le istruzioni complete sull'uso del test. Il test deve essere condotto a temperatura ambiente.

1. Accendere l'analizzatore. Quindi, a seconda delle necessità, selezionare la modalità "test standard" o "test rapido".
2. Estrarre la carta d'identità e inserirla nella porta dell'analizzatore.
3. Plasma: pipettare 5  $\mu$ L di plasma nella provetta del tampone, mescolare bene il campione e il tampone.
4. Sangue intero: trasferire 7,5  $\mu$ L di sangue intero nella provetta tampone con una pipetta; mescolare bene il campione e il tampone.
5. Aggiungere il campione diluito con una pipetta: pipettare 85  $\mu$ L di campione diluito nel pozzetto del campione della cassetta del test. Avvia il timer allo stesso tempo.
6. Sono disponibili due modalità di test per l'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™, la modalità di test standard e la modalità di test rapido. Fare riferimento al manuale utente dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per i dettagli.

**Modalità "Quick test":** dopo 15 minuti di aggiunta del campione. Inserire la cassetta del test nell'analizzatore, fare clic su "QUICK TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" immediatamente. L'analizzatore fornirà automaticamente il risultato del test dopo pochi secondi.

**Modalità "Test standard":** inserire la cassetta del test nell'analizzatore immediatamente dopo aver aggiunto il campione, fare clic su "TEST STANDARD", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NUOVO TEST" allo stesso tempo, l'analizzatore effettuerà automaticamente un conto alla rovescia di 15 minuti. Dopo il conto alla rovescia, l'analizzatore darà subito il risultato.

## Quick Test Mode



Dispense Sample



Incubate the test unit



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

## Standard Test Mode



Dispense Sample



Insert the Cassette



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

Numero di Catalogo	Nome Elemento	Campione	Intervallo Test	Dimensioni KIT
FI-DDM-402	Test D-Dimero	WB / S / P	0,1-10 / L	10T / 25T