



## Test Influenza a-b Immunofluorescenza

### 【ISTRUZIONI PER L'USO Test Influenza a-b Immunofluorescenza】

Per le istruzioni complete sull'uso del test, fare riferimento al manuale operativo dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™. Il test deve essere condotto a temperatura ambiente.

Lasciare che il test, il campione, il tampone e / o i controlli raggiungano la temperatura ambiente (15-30 ° C) prima del test.

1. Accendere l'analizzatore. Quindi, a seconda delle necessità, selezionare la modalità "test standard" o "test rapido".
2. Estrarre la scheda ID e inserirla nello slot per scheda ID dell'analizzatore.
3. Rimuovere la cassetta test dalla busta di alluminio sigillata e utilizzarla il prima possibile. I migliori risultati si ottengono se il test viene eseguito immediatamente dopo l'apertura della busta di alluminio.
4. Posizionare la provetta di estrazione nella stazione di lavoro. Tenere il flacone del reagente di estrazione capovolto verticalmente. Stringere il flacone e lasciare cadere la soluzione nel tubo di estrazione liberamente senza toccare il bordo del tubo. Aggiungere 10 gocce di reagente di estrazione (circa 400 µl) alla provetta di estrazione.
5. Posizionare il campione del tampone nella provetta di estrazione. Ruotare il tampone per circa 10 secondi mentre si preme la testa contro l'interno della provetta per rilasciare l'antigene nel tampone.
6. Rimuovere il tampone premendo la testa del tampone contro l'interno della provetta di estrazione mentre lo si rimuove per espellere quanto più liquido possibile dal tampone. Gettare il tampone in conformità con il protocollo di smaltimento dei rifiuti a rischio biologico.
7. Montare la punta del contagocce sulla parte superiore del tubo di estrazione. Posizionare la cassetta test su una superficie pulita e piana.
8. Aggiungere tre gocce della soluzione (circa 120µL) al pozzetto del campione e quindi avviare il timer.
9. Sono disponibili due modalità di test per l'FIATEST™ analizzatore immunologico a fluorescenza, modalità di test standard e modalità di test rapido. Si prega di fare riferimento al manuale di FIATEST™ fluorescenza Immunoassay Analyzer per i dettagli.

**Modalità "Test rapido":** dopo 15 minuti di aggiunta del campione, inserire la cassetta del test nell'analizzatore, fare clic su "TEST RAPIDO", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NUOVO TEST" immediatamente.

L'analizzatore fornirà automaticamente il risultato del test dopo pochi secondi.

**Modalità "Standard test":** inserire la cassetta del test nell'analizzatore immediatamente dopo aver aggiunto il campione, fare clic su "STANDARD TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" allo stesso tempo, l'analizzatore effettuerà automaticamente un conto alla rovescia di 15 minuti. Dopo il conto alla rovescia, l'analizzatore darà subito il risultato.

## Quick Test Mode



Dispense Sample



Incubate the test unit



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

## Standard Test Mode



Dispense Sample



Insert the Cassette



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

| Numero di Catalogo | Nome Elemento                         | Campione  | Intervallo Test | Dimensioni KIT |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| FI-FLU-502         | Test Influenza a-b Immunofluorescenza | Tampone a | 30HA / mL       | 10T / 25T      |