



Test Mioglobina a Immunofluorescenza

【ISTRUZIONI PER L'USO Test Mioglobina a Immunofluorescenza】

Fare riferimento al manuale operativo dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per le istruzioni complete sull'uso del test. Il test deve essere condotto a temperatura ambiente.

1. Accendere l'analizzatore. Quindi, a seconda delle necessità, selezionare la modalità "test standard" o "test rapido".
2. Estrarre la scheda ID e inserirla nello slot per scheda ID dell'analizzatore.
3. Siero / plasma: pipettare 50 µL di siero / plasma nella provetta del tampone, mescolare bene il campione e il tampone.

Sangue intero: trasferire 75 µL di sangue intero nella provetta tampone con una pipetta; mescolare bene il campione e il tampone.

4. Aggiungere il campione diluito con una pipetta: pipettare 85 µL di campione diluito nel pozzetto del campione della cassetta del test. Avvia il timer allo stesso tempo.
5. Sono disponibili due modalità di test per l'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™, la modalità di test standard e la modalità di test rapido. Fare riferimento al manuale utente dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per i dettagli.

Modalità "Test rapido": dopo 15 minuti di aggiunta del campione, inserire la cassetta del test nell'analizzatore, fare clic su "TEST RAPIDO", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NUOVO TEST" immediatamente. L'analizzatore fornirà automaticamente il risultato del test dopo pochi secondi.

Modalità "Standard test": inserire la cassetta del test nell'analizzatore immediatamente dopo aver aggiunto il campione, fare clic su "STANDARD TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" allo stesso tempo, l'analizzatore effettuerà automaticamente un conto alla rovescia di 15 minuti. Dopo il conto alla rovescia, l'analizzatore darà subito il risultato.

Quick Test Mode



Dispense Sample



Incubate the test unit



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

Standard Test Mode



Dispense Sample



Insert the Cassette



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

Numero di Catalogo	Nome Elemento	Campione	Intervallo Test	Dimensioni KIT
FI-MYO-402	Test Mioglobina a Immunofluorescenza	WB / S / P	5-200 ng /mL	10T / 25T