



## Test Tiroide TSH

### 【ISTRUZIONI PER L'USO Test Tiroide TSH】

Fare riferimento al manuale operativo dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per le istruzioni complete sull'uso del test. Il test dovrebbe essere a temperatura ambiente.

Lasciare che il test tiroide TSH, il campione, il tampone e / o i controlli raggiungano la temperatura ambiente (15-30 ° C) prima del test.

1. Accendere l'analizzatore. Quindi, a seconda delle necessità, selezionare la modalità "Test standard" o "Test rapido".
2. Rimuovere la scheda ID e inserirla nella porta dell'analizzatore.
3. Siero o plasma: pipettare 75 µL di siero o plasma nella provetta del tampone, mescolare bene il campione e il tampone.
4. Aggiungere il campione diluito con una pipetta: pipettare 75 µL di campione diluito nel pozzetto del campione. Avvia il timer allo stesso tempo.
5. Sono disponibili due modalità di test per l'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™, la modalità Standard Test e la modalità Quick Test. Fare riferimento al manuale utente dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™ per i dettagli.

**Modalità "Test rapido":** inserire la cassetta del test nell'analizzatore 15 minuti dopo aver fatto clic su "TEST RAPIDO", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NUOVO TEST" immediatamente. l'analizzatore fornirà automaticamente il risultato del test dopo pochi secondi.

**Modalità "Test standard":** inserire la cassetta del test nell'analizzatore immediatamente dopo l'applicazione del campione, fare clic su "TEST STANDARD", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NUOVO TEST" allo stesso tempo, l'analizzatore effettuerà automaticamente un conto alla rovescia di 15 minuti. Dopo il conto alla rovescia, l'analizzatore darà subito il risultato.

## Quick Test Mode



Dispense Sample



Incubate the test unit



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

## Standard Test Mode



Dispense Sample



Insert the Cassette



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

Numero di Catalogo	Nome Elemento	Campione	Intervallo Test	Dimensioni KIT
FI-TSH-302	TSH Test Cassetta	S / P	0,1-100 $\mu$ IU / mL	10T / 25T