



Test Ovulazione LH

【ISTRUZIONI PER L'USO Test Ovulazione LH】

Per le istruzioni complete sull'uso del test, fare riferimento al manuale operativo dell'analizzatore immunologico a fluorescenza FIATEST™. Il test deve essere condotto a temperatura ambiente.

Lasciare che il test, il campione, il tampone e / o i controlli raggiungano la temperatura ambiente (15-30 ° C) prima del test.

1. Accendere l'analizzatore. Quindi, a seconda delle necessità, selezionare la modalità "Test standard" o "Test rapido".
2. Estrarre la scheda ID e inserirla nello slot per scheda ID dell'analizzatore.
3. Spremere 75µL di sangue intero / siero / plasma nella provetta tampone con una pipetta; mescolare bene il campione e il tampone.
4. Aggiungere il campione diluito con una pipetta: pipettare 75µL di campione diluito nel pozzetto del campione della cassetta del test. Avvia il timer allo stesso tempo.
5. Sono disponibili due modalità di test per l'FIATEST™ analizzatore immunologico a fluorescenza, modalità di test standard e modalità di test rapido. Si prega di fare riferimento al manuale di FIATEST™ fluorescenza Immunoassay Analyzer per i dettagli.

Modalità "Quick Test": dopo 15 minuti di aggiunta del campione, inserire la cassetta del test nell'analizzatore, fare clic su "QUICK TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" immediatamente.

L'analizzatore fornirà automaticamente il risultato del test dopo pochi secondi.

Modalità "Standard Test": inserire la cassetta del test nell'analizzatore immediatamente dopo aver aggiunto il campione, fare clic su "STANDARD TEST", inserire le informazioni sul test e fare clic su "NEW TEST" allo stesso tempo, l'analizzatore effettuerà automaticamente un conto alla rovescia di 15 minuti. Dopo il conto alla rovescia, l'analizzatore darà subito il risultato.

Quick Test Mode



Dispense Sample



Incubate the test unit



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

Standard Test Mode



Dispense Sample



Insert the Cassette



Press 'NEW TEST' Tab



Get Result

Numero di Catalogo	Nome Elemento	Campione	Intervallo Test	Dimensioni KIT
FI-FLH-402	Cassetta del test di ovulazione LH	WB / S / P	1-75 mIU / mL	10T / 25T