

noitest®

SYNTHETIC DRUG TEST

USO PREVISTO

Il test rapido Synthetic Drug Test per urine è un test rapido di individuazione. È un test immunologico, rapido, a scorrimento laterale per l'individuazione qualitativa di specifiche droghe e dei loro metaboliti nelle urine umane alle seguenti concentrazioni di soglia-limite:

Test	Calibratore	Cut Off
Marijuana Sintetica- K2	JWH-018 JWH-073	cut-off 50
α-Pirolidinopentiofenone (α-PVP)	α-Pirolidinopentiofenone	cut-off 1,000
Metilenediossiprovalerone(MDPV)	Metilenediossiprovalerone	cut-off 1,000
Metcatinone (MCAT)	Metcatinone	cut-off 500
Fentanyl	(FYL) Norfentanyl	cut-off 20
UR-144 UR-144 5	Acido valerico	cut-off 25
JWH	JWH-01 JWH-073	cut-off 50

Il presente test fornisce un risultato preliminare. Si dovrà impiegare un metodo chimico alternativo più specifico per ottenere un risultato analitico di conferma. Il metodo di conferma privilegiato è la Gascromatografia/spettrometria di massa (GC/MS). Saranno necessari considerazione clinica e giudizio professionale per ogni risultato del test delle droghe da abuso, soprattutto se i risultati preliminari sono positivi.

AVVISI E PRECAUZIONI

Il presente kit è solo per uso esterno. Non ingerire.

- Gettare dopo l'uso. Il test non può essere utilizzato più di una volta.
- Non utilizzare oltre la data di scadenza.
- Non utilizzare il kit se la confezione risulta bucata o non sigillata correttamente.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Prodotto non destinato a scopo medico o diagnostico

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

- Conservare ad una temperatura di 4 °C - 30 °C fino alla data di scadenza.
- tenere lontano da luce, umidità e calore.
- NON CONGELARE.

MATERIALI FORNITI

- Una confezione contenente una Test e un essiccante.
- Foglietto illustrativo


RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

- Lavare le mani con sapone e acqua calda. Aprire la confezione sigillata ed estrarre la Synthetic Drug Test per urine.
- I donatori raccoglieranno il campione di urine. Aprire il tappo del contenitore e urinare direttamente all'interno. Il volume del campione dovrà superare il livello minimo delle urine. Riappare il contenitore.

ESECUZIONE DEL TEST

Il test deve essere a temperatura ambiente (10°C to 30°C).

1. Dopo la raccolta dell'urina, riappare il contenitore e porre il Synthetic Drug Test su una superficie piana.
2. Sollevare l'etichetta e leggere il risultato dopo 5 minuti. **Non leggere il risultato dopo 10 minuti.**

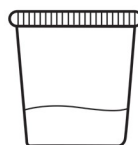

RACCOLGERE L'URINA



STACCARE L'ETICHETTA



LEGGERE IL RISULTATO DEL TEST

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

POSITIVO (+)

Una banda rosata è visibile in ogni zona di controllo. Non appare nessuna banda colorata nell'apposita zona del test. Ciò indica un risultato positivo per la droga corrispondente a quella specifica zona.


NEGATIVO (-)

Una banda rosata è visibile in ogni zona di controllo e nell'apposita zona del test. Ciò indica che la concentrazione della droga corrispondente a quella specifica zona del test è pari a zero o sotto al limite di individuazione del test.

NULLO

Se non è visibile nessuna banda colorata in ognuna delle zone di controllo o se è visibile soltanto nelle zone del test, il test è nullo. Si dovrà effettuare un altro test per rivalutare il campione. Si prega di contattare il distributore o il negozio dove si è acquistato il prodotto, comunicando il numero di lotto.

Nota: Non si attribuisce alcun significato all'intensità del colore o all'ampiezza della linea.

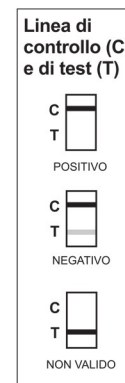

LIMITI

1. Il presente test è stato sviluppato esclusivamente per campioni di urina. Le prestazioni di questo test utilizzando campioni diversi non sono state dimostrate.
2. Campioni di urine adulterati possono produrre risultati errati. Forti agenti ossidanti come la candeggina (ipoclorito) possono ossidare l'analisi delle droghe. Se si sospetta che un campione sia stato adulterato, raccogliere un nuovo campione.
3. Il presente test è un controllo qualitativo. Non è progettato per determinare la concentrazione quantitativa delle droghe o il livello di intossicazione.
4. È possibile che errori tecnici o procedurali, così come altre sostanze che interferiscono con il campione di urine, causino risultati errati.
5. Un risultato negativo non necessariamente indica delle urine prive di droghe. Si possono ottenere risultati negativi anche quando la droga è presente ma al di sotto del livello di soglia-limite del test.
6. Il risultato del test non fa distinzione tra droghe da abuso e alcuni medicinali.
7. Alcuni cibi o integratori possono causare risultati positivi.

LEGENDA DEI SIMBOLI SULLA CONFEZIONE

Distribuito da: **NOITEST Srl**
Via Flaminia, 216/B - 61043 - Pesaro - Italia
www.noitest.it info@noitest.it

